



STAP 1

- ✓ Plaats de ligorthese naast de gebruiker ter hoogte van de knieën.
- ✓ De labels van de ligorthese zijn van bovenaf leesbaar en bevinden zich aan het voeteneinde.
- ✓ Til de benen langzaam iets op.
- ✓ Trek de ligorthese van links naar rechts onder de benen door.

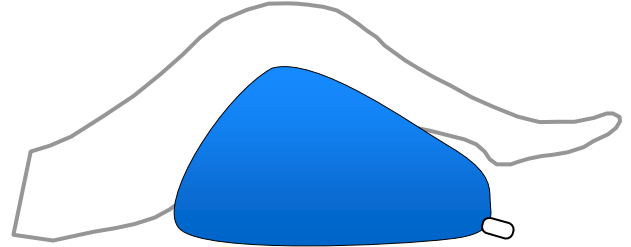

STAP 2

- ✓ Trek de ligorthese van links naar rechts onder de benen door.
- ✓ Plaats van bovenaf het losse middengedeelte tussen de knieën. Label van het middengedeelte bij voeteneinde en van bovenaf leesbaar.

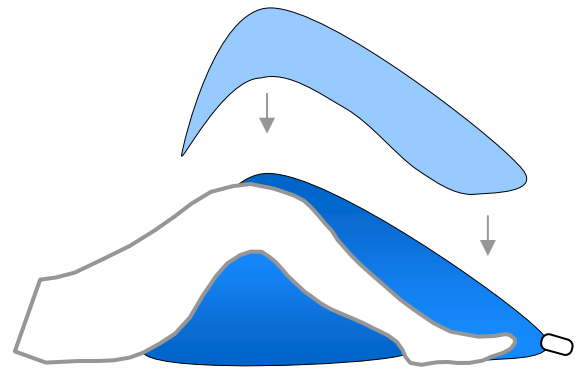

EINDPOSITIE



- ✓ Labels leesbaar van bovenaf en aan de voetenzijde.
- ✓ Het middengedeelte tussen de knieën.

