



### STAP 1

- ✓ Plaats de ligorthese bij het voeteneinde.
- ✓ De labels van de ligorthese zijn van bovenaf leesbaar en bevinden zich aan het voeteneinde.
- ✓ Til de benen langzaam iets op.

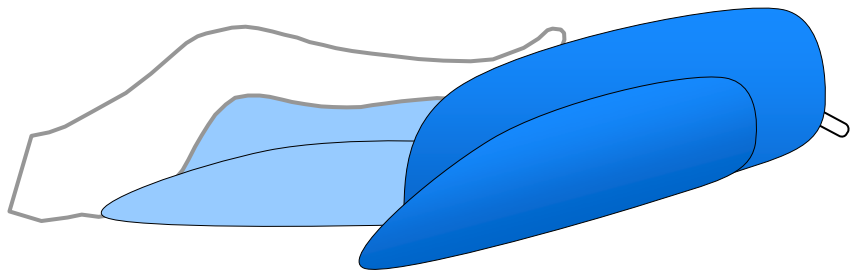

### STAP 2

- ✓ Trek de ligorthese richting de billen totdat de hielen vrij liggen.
- ✓ Trek het middengedeelte tussen de knieën omhoog.

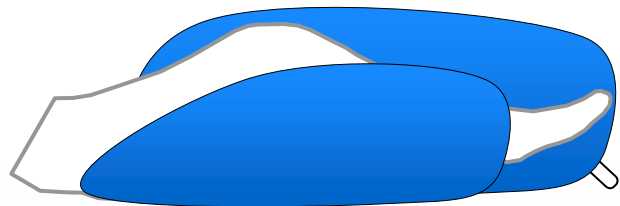

### EINDPOSITIE



- ✓ Labels leesbaar van bovenaf en aan de voetenzijde.
- ✓ Het aflopende deel ter hoogte van de billen.
- ✓ Het middengedeelte tussen de knieën en loopt bij de voeten verder door.

